



Abbott


CONSEJOS TÉCNICOS

RECOGIDA CON HISOPOS NASOFARÍNGEOS PARA PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE


⚠ Recordatorios importantes

- Utilice solo el hisopo nasofaríngeo específico para la recogida de muestras que se proporciona en el kit de pruebas.
- No utilice los hisopos de control positivo o negativo para la recogida de muestras.
- Las muestras de hisopo directo deben analizarse inmediatamente después de la recogida. Si no es posible realizar la prueba de inmediato, la muestra de hisopo se puede guardar en un tubo de extracción lleno de un tampón de extracción (300 µl) a temperatura ambiente (15 °C - 30 °C) hasta dos horas antes de la prueba.


- 1 Incline la cabeza del paciente hacia atrás entre 45° y 70° para alinear el conducto desde la parte frontal de la nariz.

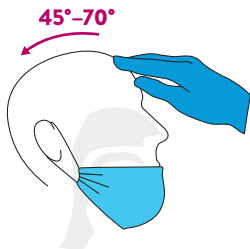

- 2 Introduzca el hisopo a través de la fosa nasal de forma paralela al paladar. Apunte el hisopo hacia el lóbulo de la oreja del paciente e introdúzcalo lentamente. No introduzca el hisopo a la fuerza; debe desplazarse suavemente por el conducto nasal.

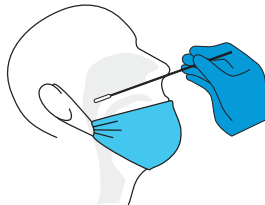


- 3 El hisopo debe alcanzar una profundidad igual a la distancia desde las fosas nasales hasta la abertura externa del oído.

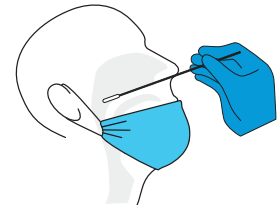


Nota: Si encuentra resistencia, retire el hisopo e intente introducirlo en la otra fosa nasal. Asegúrese de introducirlo con el ángulo correcto, apuntando hacia el lóbulo de la oreja.

- 4 Frote y gire suavemente el hisopo 3 o 4 veces con un movimiento rotatorio.

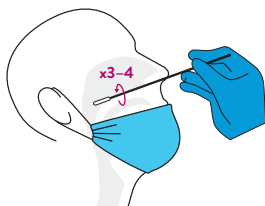

- 5 Deje el hisopo en esta posición durante varios segundos para que absorba las secreciones.

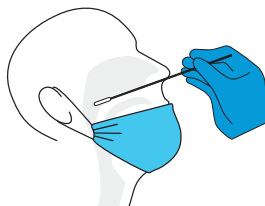

- 6 Retire lentamente el hisopo mientras lo gira.

